

# Dr. Hop<sup>+</sup>

## SCHEDA PRODOTTO MASCHERINE CHIRURGICHE

### Kids 6-12 anni



**Mascherine mediche facciali monouso 3 strati.**  
Dotate di elastici auricolari e barra nasale modellabile che consentono un'adeguata adattabilità della mascherina al viso.



**Strato esterno**  
materiale "Spun Bond" TNT (tessuto non tessuto). Conferisce solidità alla mascherina garantendo bassa resistenza alla respirazione.


**Strato intermedio**  
TNT prodotto con tecnologia "Melt Blown". È costituito da microfibre di diametro da 1 - 3 micron che svolgono la funzione filtrante.

**Strato interno**  
"Spun Bond", l'ultimo strato a contatto con la cute con lo scopo di proteggerla dallo strato filtrante

Dispositivo medico

Dispositivo medico conforme alla normativa UNI EN 14683:201 - Tipo I

# SPECIFICHE DEL PRODOTTO

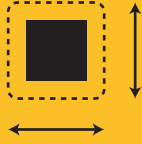

**Dimensioni mascherina:**  
12,5 x 9,5 cm



**Materiali/strati:**  
3 strati in tessuto  
non tessuto



**Materiale adattatore nasale:**  
alluminio Senza Lattice  
Senza fibre di vetro



**Data di scadenza:**  
3 anni Non è un prodotto sterile



**Classe di appartenenza:**  
I non sterile Direttiva 93

## Modalità d'uso

1. Allineare la barra nasale al naso e indossare la mascherina con il lato blu rivolto verso l'esterno, inserendo gli elastici.
2. Regolare delicatamente la barra nasale.
3. Assicurarci che sia ben posizionata sul viso.

## Avvertenze d'uso:

Non riutilizzare. Conservare in luogo asciutto al riparo dalla luce a temperatura ambiente. Il prodotto deve essere smaltito secondo le vigenti normative

## Confezionamento:

I prodotti sono confezionati in una scatola (50 pz) o in una bustina (10 pz). Questa confezione garantisce un'adeguata protezione impermeabile e permette al prodotto di giungere al consumatore finale in condizioni igieniche sicure.  
PACK MULTILINGUE: IT, EN, FR, ES, DE



Conservare il dispositivo medico lontano da fonti di calore, fiamme libere, irraggiamento solare diretto e da agenti atmosferici. Conservare in un luogo fresco. Temperatura di conservazione 10-30°C. Il prodotto garantisce una durata di 5 anni se ben conservato.



Keep the medical device away from sources of heat, open flames, direct sunlight and atmospheric agents. Keep in a cool place. Storage temperature 10-30 ° C. The product guarantees a duration of 5 years if well preserved.



Mantenga el dispositivo médico alejado de fuentes de calor, llamas abiertas, luz solar directa y agentes atmosféricos. Mantenga en un lugar fresco. Temperatura de almacenamiento 10-30 ° C. El producto garantiza una duración de 5 años si está bien conservado.



[www.doctorhop.it](http://www.doctorhop.it)



## STANDARD APPLICATI

DIRETTIVA 93/42/CEE, DEL 14 giugno 1993 e ss.mm.ii.  
DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1997, n° 46 e ss.mm.ii.  
UNI EN ISO 9001:2015 - Sistemi di gestione per la qualità  
UNI CEI EN ISO 13485:2016  
UNI CEI EN ISO 15223-1:20127  
UNI CEI EN 1041:2013  
UNI CEI EN ISO 14971:2012  
UNI EN ISO 10993-1:2010  
UNI EN ISO 10993-5:2009



## CERTIFICAZIONI FABBRICANTE

Sistema di Gestione Qualità Certificato TUV SÚD  
ai sensi della norma EN ISO 13485:2016 - Medical devices  
- Quality DECRETO MINISTERO DELLA SALUTE 15/11/2005.  
management systems - Requirements for regulatory purposes



981110265



981067275