







Solo per uso professionale Non utilizzare per auto analisi

Test Rapido Antigene SARS-CoV-2

Il test rapido Antigene Egens® SARS-CoV-2 è un test rapido per la rilevazione qualitativa dell'antigene proteico nucleocapside da SARS-CoV-2 in campioni prelevati con tampone nasale e faringeo umano. Il test è solo per uso diagnostico in vitro.

Contenuto del prodotto

Confezione da 25 Test/Kit Codice: 981467881

- 25 Test rapidi per l'antigene del nuovo SARS-Cov-2 25 Buffers
- 25 Tamponi sterili per la raccolta dei campioni
- 25 Tubi di estrazione monouso con puntale di erogazione integrato
 - 1 Foglio illustrativo

- Confezione da 1 Test/Kit Codice: 981467879 1 Test rapido per l'antigene del nuovo SARS-Cov-2

- Tampone sterile per la raccolta dei campioni Tubo di estrazione monouso con puntale di erogazione integrato
- 1 Foglio illustrativo

Caratteristiche tecniche

Nome del prodotto Egens® SARS-CoV-2 test rapido Antigene

Principio del test Oro colloidale

Tipo di campione Tampone nasale o faringeo

Volume del campione 60 µL

Durata del test 15 minuti

Temperatura di operatività 15-30°C

Temperatura di conservazione 2-30°C

Scadenza (a confezione integra) 24 mesi

Sensibilità 93.85%


Specificità100%









Fasi di esecuzione del test

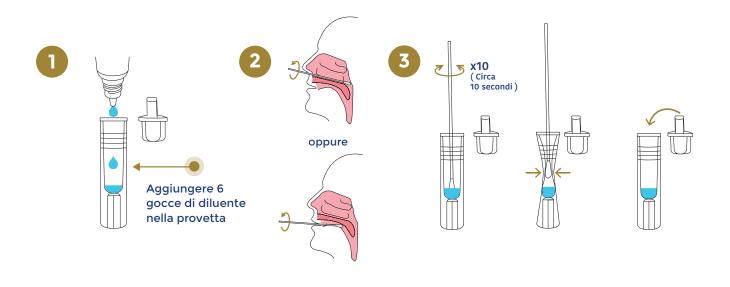



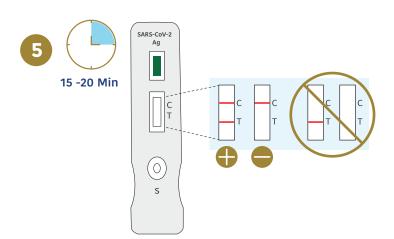

4. Interpretazione del risultato

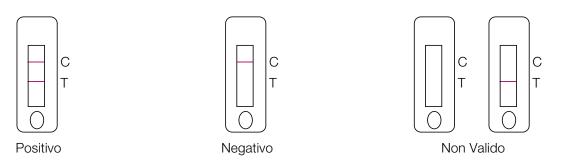

Nota: Il test rapido Egens® SARS-CoV-2 Ag è stato progettato SOLO per fungere da test di supporto per casi sospetti di rilevamento negativo degli acidi nucleici del coronavirus o in combinazione con il rilevamento degli acidi nucleici nella diagnosi di casi sospetti.

I risultati del test dell'antigene della proteina nucleocapside non devono essere utilizzati come soluzione unica per diagnosticare o escludere l'infezione da SARS-CoV-2 (COVID-19) o per informare sullo stato dell'infezione.



